

Lisez d'abord ceci :

Numéro de dossier Maxxam _____

A Contenu de la trousse du donneur

On appelle « donneur » la personne sur laquelle on prélève l'ADN. Vous devez utiliser 1 trousse de prélèvement d'échantillons par donneur.


La trousse du donneur contient :

- Des gants jetables;
- Un applicateur doté d'un embout en mousse (écouvillon);
- Une enveloppe aluminium;
- Une Micro Card FTA;
- Un sachet de déshydratant PillowPak.



Pour assurer la confidentialité du processus, n'inscrivez aucun nom sur les échantillons envoyés.

B Rappels importants


- Avant de commencer, procurez-vous :
 - Un stylo;
 - Une enveloppe-réponse.
- Le donneur ne doit rien manger ni boire (sauf de l'eau) 15 minutes avant le prélèvement. Pour recueillir un échantillon sur un nourrisson allaité, il faut attendre le plus longtemps possible après la dernière tétée (1 heure minimum) pour s'assurer que l'échantillon prélevé à l'aide de l'écouvillon buccal n'est pas contaminé par l'ADN du lait maternel.
- Utilisez une paire de gants neuve (fournie dans chaque trousse) pour prélever chaque échantillon d'ADN.
 
- Il est primordial de ne **pas contaminer** les échantillons. **Évitez de tousser, de vous moucher ou même de parler** au-dessus de l'applicateur ou de la carte FTA.
- Vous devez terminer le prélèvement de l'échantillon pour un donneur (la carte FTA est fermée et l'enveloppe aluminium contenant le sachet Pillow Pak et la carte FTA est hermétiquement scellée) avant de passer au donneur suivant.



N'OUVREZ PAS la seconde « trousse » ou enveloppe avant d'avoir fermé hermétiquement l'enveloppe aluminium contenant le premier échantillon d'ADN.

C Prélèvement des échantillons d'ADN

1. Après avoir enfilé une paire de gants neuve, retirez la carte FTA de l'enveloppe aluminium (laissez le sachet Pillow Pak à l'intérieur). Inscrivez le numéro de dossier de Maxxam, l'identité du donneur (ex. : mère, enfant, père supposé 1, père supposé 2, etc.) ainsi que son origine ethnique (pour le père supposé seulement) sur les lignes figurant en bas de la carte. Ne touchez pas à la partie rose de celle-ci. Notez les mêmes renseignements sur la partie inférieure de l'enveloppe aluminium (voir photo ci-contre).

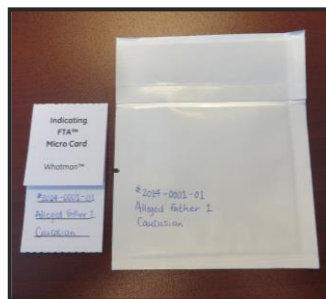

Origines ethniques proposées :

- Blanc
- Noir
- Indien
- Oriental
- Aborigène
- Hispanique


2. Retirez avec précaution l'applicateur à embout de mousse stérile Whatman de son emballage en le prenant par la tige (évitiez tout contact avec l'embout).



3. Frottez l'intérieur de la bouche du donneur avec l'applicateur pendant 20 à 30 secondes. Passez-le fermement des deux côtés sur l'intérieur des joues, sous la langue et derrière les lèvres.



4. Ouvrez la carte FTA. Appliquez l'embout en mousse sur le cercle de la partie rose en tenant l'applicateur par la tige (ne touchez pas l'embout).

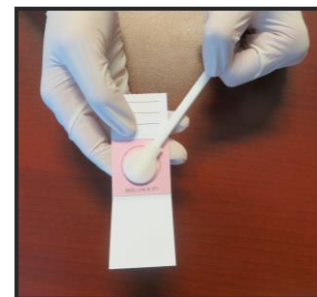

NE FROTTEZ PAS l'embout sur la carte : appuyez simplement un côté de celui-ci sur la carte pendant 10 à 15 secondes puis retournez-le pour appliquer l'autre côté sur le cercle pendant 10 secondes.

NOTE : Lorsque l'échantillon recueilli sur l'embout en mousse est appliqué sur la carte, le cercle change de couleur et passe de rose à blanc.

5. Attendez 1 à 2 minutes puis rabattez avec précaution la partie supérieure de la carte FTA sur la partie dotée du cercle.

6. Retirez le papier collant de l'enveloppe aluminium puis glissez l'échantillon à l'intérieur de celle-ci. Fermez l'enveloppe.



7. Retirez et jetez les gants, l'écouvillon, l'emballage et les autres déchets.

8. Répétez tout le processus depuis le point 1 pour chaque nouveau donneur.



D Envoi des échantillons à notre laboratoire

Une fois que vous avez suivi les étapes décrites au point C pour chaque donneur, envoyez l'ensemble des échantillons dans une seule enveloppe par courrier (service normal ou express) ou service de messagerie prépayé à l'adresse suivante :

TheDNALab
Attention: Paternity Log-In
335 Laird Road, Unit 2
Guelph, Ontario N1G 4P7

Pour toute question, écrivez à adninfo@maxxam.ca ou appelez-nous au **1 877 706-7678** en nous indiquant votre numéro de dossier Maxxam

Nous vous ferons parvenir les résultats par courriel ou courrier dans les 3 à 5 jours ouvrables une fois l'ensemble des échantillons reçus.